

# Tabela de Conversão: Lentes de Contato ACUVUE® para ASTIGMATISMO

- ✓ As lentes de contato ACUVUE® para Astigmatismo tem **93% de sucesso geral nas adaptações<sup>1</sup>**
- ✓ **9 a cada 10** profissionais classificaram as lentes de contato ACUVUE® para Astigmatismo **fáceis de adaptar<sup>2</sup>**

Poder Esférico dos Óculos	Poder Cilíndrico dos Óculos											
	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50
+5.75	+6.00	+6.00	+6.00	+6.00	+6.00	+6.00	+6.00	+6.00	+6.00	+6.00	-	-
+5.50	+5.75	+6.00	+5.75	+6.00	+5.75	+6.00	+5.75	+6.00	+5.75	+5.50	-	-
+5.25	+5.50	+5.50	+5.50	+5.75	+5.50	+5.50	+5.50	+5.50	+5.50	+5.25	-	-
+5.00	+5.25	+5.25	+5.25	+5.25	+5.25	+5.25	+5.25	+5.25	+5.25	+5.00	-	-
+4.75	+5.00	+4.75	+5.00	+5.00	+5.00	+5.00	+5.00	+5.00	+5.00	+4.75	-	-
+4.50	+4.75	+4.50	+4.75	+4.75	+4.75	+4.75	+4.75	+4.75	+4.75	+4.50	+4.50	-
+4.25	+4.50	+4.25	+4.50	+4.50	+4.50	+4.50	+4.50	+4.50	+4.50	+4.25	+4.00	-
+4.00	+4.25	+4.00	+4.25	+4.00	+4.25	+4.25	+4.00	+4.25	+4.00	+4.00	+3.75	-
+3.75	+4.00	+3.75	+4.00	+3.75	+3.75	+4.00	+3.75	+4.00	+3.75	+3.75	+3.50	-
+3.50	+3.50	+3.50	+3.50	+3.50	+3.50	+3.50	+3.50	+3.75	+3.50	+3.50	+3.25	-
+3.25	+3.25	+3.25	+3.25	+3.25	+3.25	+3.25	+3.25	+3.50	+3.25	+3.25	+3.00	-
+3.00	+3.00	+3.00	+3.00	+3.00	+3.00	+3.00	+3.00	+3.00	+3.00	+3.00	+2.75	-
+2.75	+2.75	+2.75	+2.75	+2.75	+2.75	+2.75	+2.75	+2.75	+2.75	+2.75	+2.50	-
+2.50	+2.50	+2.50	+2.50	+2.50	+2.50	+2.50	+2.50	+2.50	+2.50	+2.50	+2.25	-
+2.25	+2.25	+2.25	+2.25	+2.25	+2.25	+2.25	+2.25	+2.25	+2.25	+2.25	+2.00	-
+2.00	+2.00	+2.00	+2.00	+2.00	+2.00	+2.00	+2.00	+2.00	+2.00	+2.00	+1.75	-
+1.75	+1.75	+1.75	+1.75	+1.75	+1.75	+1.75	+1.75	+1.75	+1.75	+1.75	+1.50	-
+1.50	+1.50	+1.50	+1.50	+1.50	+1.50	+1.50	+1.50	+1.50	+1.50	+1.50	+1.25	+1.25
+1.25	+1.25	+1.25	+1.25	+1.25	+1.25	+1.25	+1.25	+1.25	+1.25	+1.25	+1.00	+1.00
+1.00	+1.00	+1.00	+1.00	+1.00	+1.00	+1.00	+1.00	+1.00	+1.00	+1.00	+0.75	+0.75
+0.75	+0.75	+0.75	+0.75	+0.75	+0.75	+0.75	+0.75	+0.75	+0.75	+0.75	+0.50	+0.50
+0.50	+0.50	+0.50	+0.50	+0.50	+0.50	+0.50	+0.50	+0.50	+0.50	+0.50	+0.25	+0.25
+0.25	+0.25	+0.25	+0.25	+0.25	+0.25	+0.25	+0.25	+0.25	+0.25	+0.25	plano	plano
plano	plano	plano	plano	plano	plano	plano	plano	plano	plano	plano	plano	plano
-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.50	-0.50
-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.75	-0.75
-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-1.00	-1.00	-1.00
-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.25	-1.00	-1.25	-1.25
-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.50	-1.25	-1.50	-1.50
-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	-1.50	-1.75	-1.50	-1.75	-1.50	-1.50	-1.75
-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-2.00	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-2.00
-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.25
-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.50
-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.50	-2.75
-2.75	-2.75	-2.75	-2.50	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75	-2.75
-3.00	-2.75	-3.00	-2.75	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-2.75	-3.00	-3.00
-3.25	-3.00	-3.25	-3.00	-3.25	-3.25	-3.25	-3.25	-3.25	-3.25	-3.00	-3.25	-3.25
-3.50	-3.25	-3.50	-3.25	-3.50	-3.50	-3.50	-3.50	-3.50	-3.50	-3.25	-3.50	-3.50
-3.75	-3.50	-3.75	-3.50	-3.75	-3.75	-3.75	-3.75	-3.75	-3.75	-3.50	-3.75	-3.75
-4.00	-3.75	-4.00	-4.00	-3.75	-4.00	-3.75	-4.00	-3.75	-4.00	-3.75	-3.75	-4.00
-4.25	-4.00	-4.00	-4.25	-4.00	-4.25	-4.00	-4.25	-4.00	-4.25	-4.00	-4.00	-4.25
-4.50	-4.25	-4.25	-4.50	-4.25	-4.50	-4.25	-4.50	-4.25	-4.25	-4.50	-4.25	-4.50
-4.75	-4.50	-4.50	-4.75	-4.50	-4.75	-4.50	-4.50	-4.50	-4.50	-4.75	-4.50	-4.75
-5.00	-4.75	-4.75	-5.00	-4.75	-4.75	-4.75	-4.75	-4.75	-4.75	-5.00	-4.75	-4.75
-5.25	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00
-5.50	-5.00	-5.25	-5.25	-5.25	-5.25	-5.25	-5.25	-5.00	-5.25	-5.25	-5.25	-5.25
-5.75	-5.25	-5.50	-5.50	-5.50	-5.50	-5.25	-5.50	-5.25	-5.50	-5.50	-5.50	-5.50
-6.00	-5.50	-5.75	-5.75	-5.50	-5.75	-5.50	-5.75	-5.75	-5.75	-5.75	-5.50	-5.75
-6.25	-5.75	-5.75	-6.00	-5.75	-6.00	-5.75	-6.00	-6.00	-5.75	-6.00	-5.75	-6.00
-6.50	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00
-6.75	-6.00	-6.00	-6.50	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00	-6.50	-6.00	-6.00	-6.00	-6.00
-7.00	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50
-7.25	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50	-6.50
-7.50	-6.50	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	-6.50	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	-6.50	-7.00
-7.75	-7.50	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00	-7.00
-8.00	-7.50	-7.00	-7.50	-7.00	-7.50	-7.00	-7.50	-7.00	-7.50	-7.00	-7.50	-7.00
-8.25	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50
-8.50	-8.00	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	-8.00	-7.50	-7.50	-7.50	-7.50	-8.00	-7.50
-8.75	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00
-9.00	-8.50	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00	-8.00
-9.25	-8.50	-8.00	-8.50	-8.00	-8.50	-8.50	-8.00	-8.50	-8.00	-8.50	-8.50	-8.00
-9.50	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50
-9.75	-9.00	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50	-9.00	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50	-8.50
-10.00	-9.00	-9.00	-9.00	-9.00	-9.00	-9.00	-9.00	-9.00	-9.00	-9.00	-9.00	-9.00

### Instruções

Para escolher a lente de contato ACUVUE® adequada para astigmatismo, cruze as informações: poder esférico dos óculos do paciente (na coluna à esquerda) e poder cilíndrico dos óculos (na linha superior). Para eixos cilíndricos oblíquos, checar a tabela de parâmetro na página de trás.

Os valores da tabela representam os graus esféricos das lentes tóricas.

### Importante

Na escolha da primeira lente de teste, priorizar sempre o eixo mais próximo à refração. Se o eixo for inteiro (10°, 20°, 30°) escolher exatamente este eixo. Se for quebrado (5°, 15°, 25°) deve-se utilizar a orientação de elevar (somar 5° graus) tanto em olho direito, quanto em olho esquerdo.

- Cil -0.75
- Cil -1.25
- Cil -1.75
- Cil -2.25
- Cil -2.75
- Testar a lente esférica

Os números em **azul** indicam que as lentes tóricas estão disponíveis para o produto ACUVUE® Oasys para Astigmatismo (AOFA).

Os números em **vermelho** indicam que as lentes tóricas estão disponíveis para os produtos ACUVUE® Oasys para Astigmatismo (AOFA), ACUVUE® Oasys 1-Day para Astigmatismo (AO1fa) e 1-Day ACUVUE® Moist para Astigmatismo (DAMFA).



Os graus das lentes de contato são calculados para uma distância ao vértice de 12,0 mm.

### Informações importantes sobre Proteção UV:

\* Ajuda a proteger contra a transmissão de radiação UV, nociva para a córnea e para o olho. **LENTE DE CONTATO QUE ABSORVA A RADIAÇÃO UV** não substituem o uso de outros métodos de proteção para os olhos que absorva a radiação UV, como óculos de proteção ou óculos de sol, pois elas não cobrem totalmente os olhos e as áreas ao redor deles. Você deve continuar usando proteção com absorção de radiação UV para os olhos. **NOTA:** A exposição prolongada à radiação UV é um dos fatores de risco associados ao desenvolvimento da catarata. A exposição baseia-se em vários fatores, como condições ambientais (altitude, geografia, céu nublado) e fatores pessoais (duração e natureza das atividades ao ar livre). As lentes de contato com bloqueador UV auxiliam na proteção contra os danos causados pela radiação UV. Entretanto, estudos clínicos não foram ainda realizados para demonstrar que o uso de lentes de contato com bloqueador UV reduz o risco de desenvolver cataratas ou outras doenças oculares. Consulte seu oftalmologista para mais informações.



# Lentes de Contato ACUVUE® para ASTIGMATISMO

As lentes ACUVUE® oferecem possibilidade de correção para 96% dos astigmatas\*.

● ACUVUE OASYS® PARA ASTIGMATISMO COM HYDRACLEAR® PLUS



● ACUVUE® OASYS 1-DAY PARA ASTIGMATISMO, 1-DAY ACUVUE MOIST® PARA ASTIGMATISMO COM LACREON®

		PODER ESFÉRICO					PODER ESFÉRICO					PODER ESFÉRICO					PODER ESFÉRICO				
		0.00D a -6.00D (incrementos de 0.25D)					-6.50D a -9.00D (incrementos de 0.50D)					+0.25D a +4.00D (incrementos de 0.25D)					+4.25D to +6.00D (incrementos de 0.50D)				
		PODER CILÍNDRICO					PODER CILÍNDRICO					PODER CILÍNDRICO					PODER CILÍNDRICO				
		-0.75	-1.25	-1.75	-2.25	-2.75	-0.75	-1.25	-1.75	-2.25	-2.75	-0.75	-1.25	-1.75	-2.25	-2.75	-0.75	-1.25	-1.75	-2.25	-2.75
EIXOS CILÍNDRICOS	OBLÍQUOS	30°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		40°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		50°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		60°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CONTRA A REGRA	70°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		80°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		90°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		100°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		110°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	OBLÍQUOS	120°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		130°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		140°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		150°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A FAVOR DA REGRA	160°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		170°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		180°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		10°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		20°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

## Avaliação da orientação da lente de contato

Se necessário, aplicar o seguinte método: **Esquerda** (sentido horário) adicionar, **Direita** (sentido anti-horário) subtrair.

**1** Depois de avaliar a adaptação, determine a quantidade e a direção da rotação.

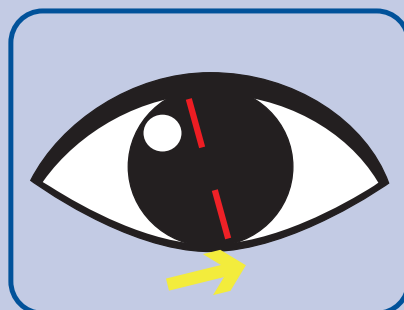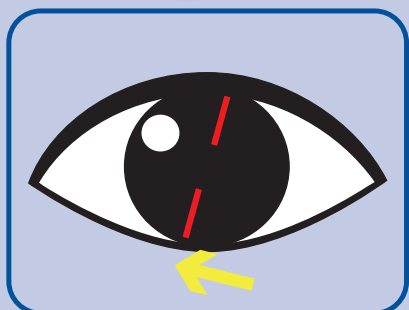

**4**

Realize o teste de adaptação com as novas lentes de contato. Elas devem se posicionar da mesma forma que as primeiras lentes testadas depois de postas no olho e com sua rotação estabilizada.

**2** Caso a lente rode para a esquerda (sentido horário), adicione o quanto rodou ao eixo da refração. Em seguida, selecione uma nova lente de contato com o novo eixo.

**3** Caso a lente rode para a direita (sentido anti-horário), subtraia a quantidade que girou ao eixo da refração. Em seguida, selecione uma nova lente de contato com o novo eixo.

1. ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM: 93% (n=218), 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM: 84% (n=178).

2. JJV Data on file 2017, ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM overall fitting success, orientation position, rotational stability and vision performance.

\*Dados em arquivo, 2014, Johnson & Johnson Vision Care. ACUVUE OASYS® para ASTIGMATISMO oferece parâmetros para 96% dos astigmatas, e 1-DAY ACUVUE® MOIST para ASTIGMATISMO oferece 87%, considerando a expansão dos SKUs em julho de 2018.

**Aviso Legal:** A calculadora e a régua de conversão foram desenvolvidas para fins educacionais. Johnson & Johnson Vision Care não se envolve, de nenhuma maneira, na prescrição da lente de contato mais apropriada para cada paciente, além da calculadora não ser uma substituta da atuação profissional para adaptação de lentes de contato. Johnson & Johnson Vision Care também não garante 100% de precisão das informações da calculadora. Cada situação clínica precisa ser considerada única e tratada individualmente de acordo com suas necessidades. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA REFRAÇÃO. CONSULTE SEU OFTALMOLOGISTA REGULARMENTE. OS PRODUTOS ACUVUE® ESTÃO DEVIDAMENTE REGULARIZADOS NA ANVISA. MAIO/2021. ID: PP2021MLT5348.